

Link do produktu: <https://5elementum.eu/akumata-polska-mata-do-akupresury-z-poduszka-czarno-mietowa-p-83.html>



Akumata – polska mata do akupresury z poduszką – czarno-miętowa

Cena	79,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5905123601545

Opis produktu

Mata do akupresury Akumata z poduszką – zarejestrowany wyrób medyczny, polska produkcja

Akumata to mata do akupresury z poduszką, wyprodukowana w Polsce i zarejestrowana jako wyrób medyczny. Zestaw przeznaczony jest do domowej stymulacji punktów akupresurowych na plecach, karku, lędźwiach i stopach. Wykonana z bawełny i trwałych kolców z tworzywa HIPS, łączy wysoką jakość materiałów z przemysłowym stopniem ostrości kolców – odpowiednim zarówno dla osób zaczynających przygodę z akupresurą, jak i tych z doświadczeniem.

Co zawiera zestaw?

- Akumata czarno-miętowa (mata z kolcami)
- Poduszka z kolcami
- Pokrowiec

Jak działa mata do akupresury i jak jej używać?

Mata działa poprzez mechaniczną stymulację punktów akupresurowych na powierzchni ciała. Kolce rozmieszczone na rozetach wywierają równomierny nacisk na skórę, pobudzając krążenie i przyczyniając się do rozluźnienia napiętych mięśni. Łącznie mata oferuje 8820 punktów akupresurowych, a poduszka – 1890, co pozwala na jednoczesne oddziaływanie na różne partie ciała.

1. Rozłóż matę na płaskiej powierzchni – podłodze lub łóżku.
2. Połóż się lub usiądź tak, aby kolce bezpośrednio dotykały skóry. Osobom początkującym zaleca się rozpoczęcie masażu przez cienką koszulkę.
3. Zaczynaj od 10-15 minut dziennie, stopniowo wydłużając czas do 20-40 minut.
4. Poduszkę umieść pod karkiem, lędźwiami lub stopami – zależnie od potrzeb.
5. Brodawki i pieprzyki zabezpiecz plastrem przed rozpoczęciem sesji.
6. Po zakończeniu masażu może pojawić się zaczerwienienie skóry – to naturalna reakcja organizmu, która ustępuje po kilku minutach.

Przeciwwskazania: Nie należy stosować maty w przypadku nadwrażliwości skóry, chorób skóry, zaburzeń krzepliwości krwi, przyjmowania leków przeciwzakrzepowych oraz schorzeń serca. Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem. Mata do akupresury nie zastępuje profesjonalnej terapii medycznej.

Korzyści dla użytkownika

Akumata sprawdzi się szczególnie u osób, które:



- odczuwają napięcie w plecach, karku, barkach lub kończynach,
- zmagają się z bezsennością lub trudnościami z zasypianiem,
- prowadzą siedzący tryb życia – pracownicy biurowi, kierowcy,
- są narażone na przewlekły stres i szukają naturalnych metod relaksacji,
- chcą wspomóc regenerację po wysiłku fizycznym.

Regularne stosowanie maty może wspierać redukcję napięcia mięśniowego, poprawę krążenia oraz ułatwiać zasypianie. Zestaw z poduszką umożliwia jednocześnie oddziaływanie na kark i plecy, co zwiększa komfort i efektywność każdej sesji.

Certyfikaty i wiarygodność

- Zarejestrowany wyrób medyczny
- Produkcja: Polska
- Materiały: 100% bawełna (pokrycie) + kolce z tworzywa HIPS

Specyfikacja techniczna

Parametry maty:

Produkcja	Polska
Szerokość	43 cm
Długość	73 cm
Grubość	2 cm
Ilość kolców na rozetce	42
Ilość rozet	210
Ilość punktów akupresurowych	8820
Materiał	bawełna
Kolce	HIPS
Wypełnienie	gąbka

Parametry poduszki:

Szerokość	15 cm
Długość	37 cm
Grubość	10 cm
Ilość kolców na rozetce	42
Ilość rozet	45
Ilość punktów akupresurowych	1890
Materiał	bawełna
Kolce	HIPS
Wypełnienie	gąbka

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: Acus Med Sp. z o.o. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

