

Link do produktu: <https://5elementum.eu/bandaze-kohezyjne-5e-max-bezowe-p-32.html>

## Bandaż Kohezyjny 5E Max 7.5cm x 4.5m – Beżowy

Cena	<b>4,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod EAN	<b>5905108022228</b>

### Opis produktu

#### **Dyskretna stabilizacja. Twoja niewidzialna tarcza w rozmiarze 7,5 cm.**

Wybierz **Bandaż Kohezyjny 5E w kolorze beżowym**, gdy potrzebujesz maksymalnego wsparcia w najbardziej dyskretnej formie. Kolor nude idealnie stapia się z karnacją, co czyni go najlepszym rozwiązaniem do codziennego użytku – zarówno w pracy, jak i podczas rehabilitacji. Szerokość 7,5 cm gwarantuje, że nawet na większych powierzchniach ciała bandaż będzie wyglądał estetycznie i schludnie.

#### **Dlaczego beżowa seria 5E to złoty standard?**

- **Delikatność dla skóry:** Brak lateksu eliminuje ryzyko podrażnień, co jest kluczowe przy noszeniu bandaża bezpośrednio na skórze przez wiele godzin.
- **Zawsze pod ręką:** Dzięki strukturze Non-Woven, bandaż oddzierasza dłońmi (w pionie i poziomie). Zapomnij o nerwowym szukaniu nożyczek w apteczce czy torbie sportowej.
- **Oddychająca struktura:** Twoja skóra pod bandażem swobodnie oddycha, co zapobiega maceracji naskórka i przyspiesza naturalne procesy regeneracji.

#### **Specyfikacja Techniczna (Karta Produktu):**





Parametr	Opis
Marka / Seria	5F / Non-Woven Hypoallergenic
Szerokość	7,5 cm (Rozmiar MAX)
Długość	4,5 m
Materiał	Miękka włóknina (hezlateksowa)
Gramatura	30 g/m <sup>2</sup>
Kolor	Beżowy (Dyskretny / Nude)

Certyfikaty:



Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE



Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I



TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

☐☐ **Przykładowe zastosowania (inspiracje):**

- Dyskretna stabilizacja nadgarstka lub przedramienia pod odzieżą biurową.
- Mocowanie opatrunków po zabiegach chirurgicznych na kończynach.
- Wsparcie dla osób starszych - bezpieczne zdejmowanie bez wrywania włosów.



Czytaj więcej

## Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

### Przewidziane Zastosowanie (Wskazania):

Bandaż kohezyjny to elastyczna opaska podtrzymująca przeznaczona do stosowania zewnętrznego.

Wyrób stosuje się w celu:

- podtrzymywania i zabezpieczania opatrunków pierwotnych (np. gazików, kompresów) na ranach,
- zapewnienia lekkiej kompresji, stabilizacji oraz wsparcia po urazach układu ruchu, takich jak skręcenia czy nacignięcia mięśni,
- mocowania okładów chłodzących lub grzewczych oraz urządzeń medycznych, takich jak szyny unieruchamiające.

### Zalety Wyrobu:

- Posiada właściwości kohezyjne – warstwy bandaża przyklejają się wyjątkowo mocno do siebie (mikrowłókna szepiąją się ze sobą), nie przywierają do skóry, włosów ani odzieży.
- Nie wymaga stosowania dodatkowych zapinek, agrafek ani plastrów mocujących.
- Zapewnia bezbolesne zdejmowanie bez ryzyka wyrywania włosów czy uszkodzenia naskórka.
- Przepuszcza powietrze, pozwalając skórze oddychać i zapobiegając jej maceracji.
- Można go łatwo urywać w dłoniach na podłożu dźwięcznym (wzdłuż i w poprzek), co ułatwia i przyspiesza aplikację.

### Przeciwwskazania:

- Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany, owrzodzenia lub oparzenia. Wyrób jest niejałowy i bezwzględnie wymaga wcześniejszego zabezpieczenia rany sterylnym opatrunkiem.
- [Zostaw ten punkt tylko, jeżeli dany model posiada lateks]: Wyrób zawiera naturalny kauczuk (lateks). Nie stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością lub alergią na ten składnik.

### Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

- Bandaż nie należy owijać zbyt ciasno, aby nie upośledzić krążenia krwi i nie spowodować ucisku nerwów.
- Należy regularnie kontrolować ukrwienie kończyny poniżej założonego opatrunku. W przypadku pojawienia się drętwienia, mrowienia, bólu, zniekształcenia, zasinienia skóry lub narastającego obrzęku, należy natychmiast zdjąć lub poluzować bandaż.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub utrzymywania się objawów niepożądanych, skonsultuj się z personelem medycznym.



Zgodnie z wymogami prawa, każdy poważny incydent związany z wyrobem należy niezwłocznie zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w Polsce.

## Instrukcja użytkowania

### (Aplikacja i usuwanie):

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacją musi być czysta, odtuszczona (np. przemyta alkoholem) i całkowicie sucha. Głębokie owłosienie należy usunąć, aby zapewnić trwałość aplikacji i zminimalizować ból przy ściąganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiednią ilość taśmy i zaokrąglij jej rogi (zapobiega to strzępieniu się krawędzi). Końce taśmy (tzw. bazy, około 3-5 cm) zawsze naklejaj bez żadnego nacięgu (0%). Naciąg czyszczyrodkowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca się wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po nałożeniu potrzyj energicznie powierzchnię taśmy dłońmi, aby wytworzone ciepło aktywowało hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu taśmy z wodą przez 1 godzinę od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, rolując go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem włosów. W celu ułatwienia procesu można wcześniej naszczyć taśmę oliwką kosmetyczną (na 15 minut przed demontażem). Nie zrywaj taśmy gwałtownie.

