

Link do produktu: <https://5elementum.eu/bandaze-kohezyjne-5e-max-czerwone-p-33.html>

## Bandaż Kohezyjny 5E Max 7.5cm x 4.5m - Czerwony

Cena	<b>4,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod EAN	<b>5905108022211</b>

### Opis produktu

#### **Energia w działaniu. Pewna pomoc tam, gdzie liczy się każda sekunda.**


Postaw na **czerwony bandaż 5E MAXI**, jeśli potrzebujesz wsparcia, którego nie da się przeoczyć. Czerwień to kolor akcji i determinacji. To idealny wybór jako element „pierwszej pomocy fizjoterapeutycznej” – doskonale widoczny w torbie sportowej i na ciele, co ułatwia monitorowanie aplikacji podczas dynamicznych zawodów.

#### **Moc i technologia w jednym:**

Seria czerwona o szerokości 7,5 cm to potężne narzędzie w rękach każdego sportowca. Materiał nie „odpuszcza” napięcia, co oznacza, że raz wykonany opatrunek trzyma się solidnie aż do momentu, gdy sam zdecydujesz o jego zdjęciu. Hipoalergiczna formuła sprawia, że nawet po bardzo intensywnym treningu Twoja skóra pozostanie w doskonałej kondycji.

#### **Specyfikacja Techniczna (Karta Produktu):**



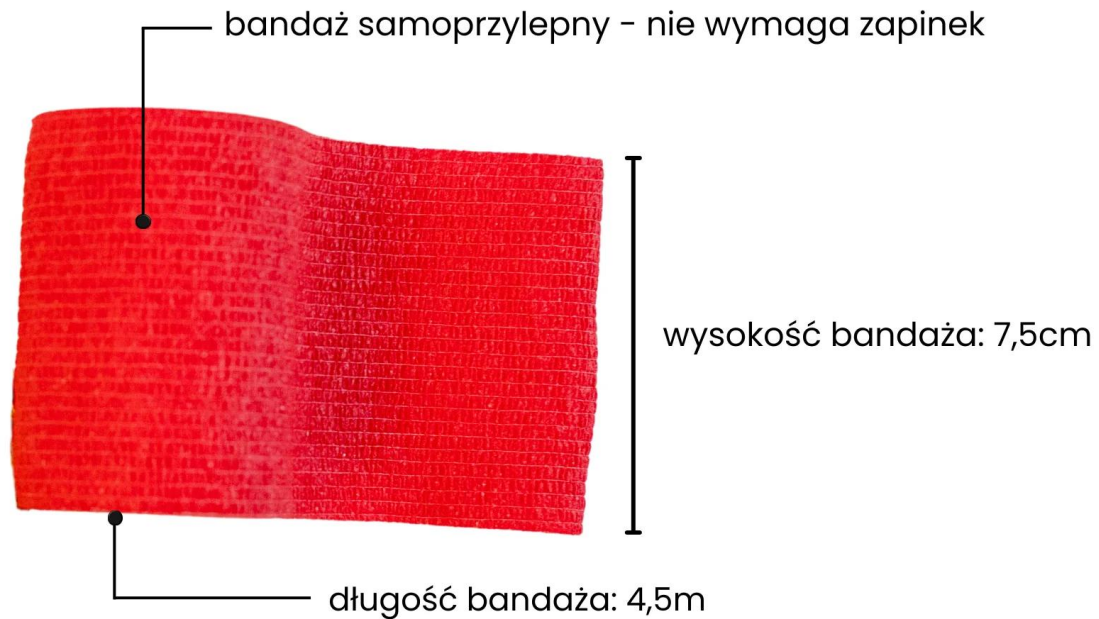

Parametr	Opis
Marka / Seria	5E / Non-Woven Hypoallergenic
Szerokość	7,5 cm (Rozmiar MAXI)
Długość	4,5 m
Materiał	Miękka włóknina (bezlakowa)
Kolor	Czerwony

**Certyfikaty:**



Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE



Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I



TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

**Przykładowe zastosowania (inspiracje):**

- Silna kompresja stawu kolanowego po skręceniu.
- Stabilizacja stawów u ciężarowców i zawodników CrossFit.
- Szybkie oznaczanie i zabezpieczanie kontuzjowanych obszarów na boisku.



Czytaj więcej

## Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

### Przewidziane Zastosowanie (Wskazania):

Bandaż kohezyjny to elastyczna opaska podtrzymująca przeznaczona do stosowania zewnętrznego.

Wyrób stosuje się w celu:

- podtrzymywania i zabezpieczania opatrunków pierwotnych (np. gazików, kompresów) na ranach,
- zapewnienia lekkiej kompresji, stabilizacji oraz wsparcia po urazach układu ruchu, takich jak skręcenia czy nacignięcia mięśni,
- mocowania okładów chłodzących lub grzewczych oraz urządzeń medycznych, takich jak szyny unieruchamiające.

### Zalety Wyrobu:

- Posiada właściwości kohezyjne – warstwy bandaża przyklejają się wyjątkowo mocno do siebie (mikrowłókna szepią się ze sobą), nie przywierają do skóry, włosów ani odzieży.
- Nie wymaga stosowania dodatkowych zapinek, agrafek ani plastrów mocujących.
- Zapewnia bezbolesne zdejmowanie bez ryzyka wyrywania włosów czy uszkodzenia naskórka.
- Przepuszcza powietrze, pozwalając skórze oddychać i zapobiegając jej maceracji.
- Można go łatwo urywać w daniach na podłogach (wzdłuż i w poprzek), co ułatwia i przyspiesza aplikację.

### Przeciwwskazania:

- Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany, owrzodzenia lub oparzenia. Wyrób jest niejałowy i bezwzględnie wymaga wcześniejszego zabezpieczenia rany sterylnym opatrunkiem.
- [Zostaw ten punkt tylko, jeśli dany model posiada lateks]: Wyrób zawiera naturalny kauczuk (lateks). Nie stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością lub alergią na ten składnik.

### Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

- Bandaż nie należy owijać zbyt ciasno, aby nie upośledzić krążenia krwi i nie spowodować ucisku nerwów.
- Należy regularnie kontrolować ukrwienie kończyny poniżej założonego opatrunku. W przypadku pojawienia się drętwienia, mrowienia, bólu, zziębnięcia, zasinienia skóry lub narastającego obrzęku, należy natychmiast zdjąć lub poluzować bandaż.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub utrzymywania się objawów niepożądanych, skonsultuj się z personelem medycznym.



Zgodnie z wymogami prawa, każdy poważny incydent związany z wyrobem należy niezwłocznie zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w Polsce.

## Instrukcja użytkowania

### (Aplikacja i usuwanie):

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacją musi być czysta, odkażona (np. przemyta alkoholem) i całkowicie sucha. Głębokie owłoczenia należy usunąć, aby zapewnić trwałość aplikacji i zminimalizować ból przy naklejeniu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiednią ilość taśmy i zaokrąglij jej rogi (zapobiega to strzępieniu się krawędzi). Końce taśmy (tzw. bazy, około 3-5 cm) zawsze naklejaj bez nadanego nacięgu (0%). Naciąg czynnikiem różnicującym dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca się wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po nałożeniu potrzyj energicznie powierzchnię taśmy dłońmi, aby wytworzone ciepło aktywowało hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu taśmy z wodą przez 1 godzinę od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, rolując go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem włosa. W celu ułatwienia procesu można wcześniej naszczyć taśmę oliwką kosmetyczną (na 15 minut przed demontażem). Nie zrywaj taśmy gwałtownie.

