

Link do produktu: <https://5elementum.eu/bandaze-kohezyjne-5e-standard-bezowe-p-27.html>

Bandaż Kohezyjny 5E Standard 5cm x 4.5m – Beżowy

Cena	3,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5905108022167

Opis produktu

Dyskrecja i profesjonalizm. Niewidzialna ochrona Twoich stawów.

Bandaż w kolorze **beżowym (Nude)** to wybór dla osób ceniących estetykę i dyskrecję. Idealnie stapia się z karnacją, dzięki czemu wsparcie Twojego nadgarstka czy palców nie rzuca się w oczy. To „złoty standard” w gabinetach fizjoterapeutycznych i w codziennym użytkowaniu biurowym.

Dlaczego warto go mieć?

- **Invisible Support:** Świetny pod odzież lub na nieosłonięte części ciała, gdy nie chcesz eksponować kontuzji.
- **Bezpieczeństwo dla delikatnych:** Brak bezpośredniego kleju sprawia, że jest to najlepszy wybór dla seniorów i dzieci o wrażliwej skórze.
- **Wielozadaniowość:** Doskonale trzyma opatrunki jałowe oraz kompresy żelowe (ciepło/zimno) w sposób niemal niezauważalny.





Parametr	Specyfikacja
Marka	5E
Materiał	Lateksowa włóknina (Non-Woven Economic)
Gramatura	30 g/m ²
Wymiar	5 cm x 4.5 m
Kolor	Beżowy

Certyfikaty:



Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE



Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I



TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

Przykładowe zastosowania (inspiracje):

- **Wsparcie biurowe:** Dyskretna stabilizacja nadgarstka przy długotrwałej pracy przy komputerze - niemal niewidoczny na skórze.
- **Opieka nad seniorami:** Bezpieczne mocowanie opatrunków na cienkiej, wrażliwej skórze, bez bolesnego



wrywania włosów przy zdejmowaniu.

- **Rehabilitacja domowa:** Precyzyjne podtrzymywanie okładów typu "ciepło-zimno" na łokciu lub przedramieniu.

Czytaj więcej

Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

Przewidziane Zastosowanie (Wskazania):

Bandaż kohezyjny to elastyczna opaska podtrzymująca przeznaczona do stosowania zewnętrznego.

Wyrób stosuje się w celu:

- podtrzymywania i zabezpieczania opatrunków pierwotnych (np. gazików, kompresów) na ranach,
- zapewnienia lekkiej kompresji, stabilizacji oraz wsparcia po urazach układu ruchu, takich jak skręcenia czy nacignięcia mięśni,
- mocowania okładów chłodzących lub grzewczych oraz urządzeń medycznych, takich jak szyny unieruchamiające.

Zalety Wyrobu:

- Posiada właściwości kohezyjne – warstwy bandaża przyklejają się wyraźnie same do siebie (mikrowłókna szepiąć się ze sobą), nie przywierają do skóry, włosów ani odzieży.
- Nie wymaga stosowania dodatkowych zapinek, agrafek ani plastrów mocujących.
- Zapewnia bezbolesne zdejmowanie bez ryzyka wrywania włosów czy uszkodzenia naskórka.
- Przepuszcza powietrze, pozwalając skórze oddychać i zapobiegając jej maceracji.
- Można go łatwo urywać w dłoniach na podłożu (wzdłuż i w poprzek), co ułatwia i przyspiesza aplikację.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany, owrzodzenia lub oparzenia. Wyrób jest niejałowy i bezwzględnie wymaga wcześniejszego zabezpieczenia rany sterylnym opatrunkiem.
- [Zostaw ten punkt tylko, jeśli dany model posiada lateks]: Wyrób zawiera naturalny kauczuk (lateks). Nie stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością lub alergią na ten składnik.

Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

- Bandaż nie należy owijać zbyt ciasno, aby nie upośledzić krążenia krwi i nie spowodować ucisku nerwów.
- Należy regularnie kontrolować ukrwienie kończyny poniżej założonego opatrunku. W przypadku pojawienia się drętwienia, mrowienia, bólu, znieczulenia, zasinienia skóry lub narastającej



obrzu?ku, nale?y natychmiast zdj?? lub poluzowa? banda?.

- W przypadku wyst?pienia reakcji alergicznej lub utrzymywania si? objawów niepo??danych, skonsultuj si? z personelem medycznym.

Zgodnie z wymogami prawa, ka?dy powa?ny incydent zwi?zany z wyrobem nale?y niezw?ocznie zg?osi?c Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz Prezesowi Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w Polsce.

Instrukcja u?ytkowania

(Aplikacja i usuwanie):

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacj? musi by? czysta, odt?uszczona (np. przemyta alkoholem) i ca?kowicie sucha. G?ste ow?osienie nale?y usun??, aby zapewni? trwa?o?? aplikacji i zminimalizowa? ból przy ?ci?ganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiedni? d?ugo?? ta?my i zaokr?gluj jej rogi (zapobiega to strz?pieniu si? kraw?dzi). Ko?ce ta?my (tzw. bazy, oko?o 3-5 cm) zawsze naklejaj bez ?adnego naci?gu (0%). Naci?g cz??ci ?rodkowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca si? wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po na?o?eniu potrzyj energicznie powierzchni? ta?my d?oni?, aby wytworzone ciep?o aktywowa?o hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu ta?my z wod? przez 1 godzin? od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, roluj?c go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem w?osa. W celu u?atwienia procesu mo?na wcze?niej nas?czy? ta?m? oliwk? kosmetyczn? (na 15 minut przed demonta?em). Nie zrywaj ta?my gwa?townie.

