

Link do produktu: <https://5elementum.eu/bandaze-kohezyjne-5e-standard-czerwone-p-26.html>

## Bandaż Kohezyjny 5E Standard 5cm x 4.5m – Czerwony

Cena	<b>3,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod EAN	<b>5905108022174</b>

### Opis produktu

#### **Energia i czujność. Bądź widoczny, bądź bezpieczny.**

Wybierz **czerwony bandaż 5E**, jeśli szukasz wsparcia, które dodaje odwagi i dynamiki. Czerwień to kolor akcji – w sporcie oznacza gotowość do walki i szybką reakcję. To najbardziej widoczny element Twojej apteczki, który w sytuacjach awaryjnych znajdziesz w ułamku sekundy.

#### **Kluczowe zalety:**

- **Maksymalna Widoczność:** Idealny do oznaczania stabilizacji stawów podczas zawodów – sędziowie i trenerzy widzą Twoją gotowość.
- **Kontrola Kompresji:** Wyjątkowa rozciągliwość pozwala na „dozowanie” ucisku – od delikatnego wsparcia palca po silne usztywnienie nadgarstka.
- **Oddychająca struktura:** Mimo intensywnego koloru, materiał zapewnia pełną cyrkulację powietrza, co jest kluczowe podczas długiego wysiłku.





Parametr	Specyfikacja
Marka	5E
Materiał	Lateksowa włóknina (Non-Woven Economic)
Gramatura	30 g/m <sup>2</sup>
Wymiar	5 cm x 4.5 m
Kolor	Ciemnozielony (Tactical Green)



#### Certyfikaty:

Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE

Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I

TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

#### Przykładowe zastosowania (inspiracje):

- **Szybka stabilizacja nadgarstków:** Idealny dla bokserów i zawodników sportów walki jako dodatkowe wsparcie pod rękawice.
- **Zabezpieczenie stopy u piłkarzy:** Doskonali do trzymania nagolekniaków oraz stabilizacji stawu skokowego



- **Pomoc doraźna:** Widoczny kolor ułatwia szybkie odnalezienie bandaża w torbie medycznej podczas nagłego urazu na boisku.

Czytaj więcej

## Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

### Przewidziane Zastosowanie (Wskazania):

Bandaż kohezyjny to elastyczna opaska podtrzymująca przeznaczona do stosowania zewnętrznego.

Wyrób stosuje się w celu:

- podtrzymywania i zabezpieczania opatrunków pierwotnych (np. gazików, kompresów) na ranach,
- zapewnienia lekkiej kompresji, stabilizacji oraz wsparcia po urazach układu ruchu, takich jak skręcenia czy nacignięcia mięśni,
- mocowania okładów chłodzących lub grzewczych oraz urządzeń medycznych, takich jak szyny unieruchamiające.

### Zalety Wyrobu:

- Posiada warstwy kohezyjne – warstwy bandaża przyklejają się wyraźnie same do siebie (mikrowłókna szepiają się ze sobą), nie przywierają do skóry, włosów ani odzieży.
- Nie wymaga stosowania dodatkowych zapinek, agrafek ani plastrów mocujących.
- Zapewnia bezbolesne zdejmowanie bez ryzyka wrywania włosów czy uszkodzenia naskórki.
- Przepuszcza powietrze, pozwalając skórze oddychać i zapobiegając jej maceracji.
- Można go łatwo urywać w dłoniach na podłogę (wzduż i w szerz), co ułatwia i przyspiesza aplikację.

### Przeciwwskazania:

- Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany, owrzodzenia lub oparzenia. Wyrób jest niejako i bezwzględnie wymaga wcześniejszego zabezpieczenia rany sterylnym opatrunkiem.
- [Zostaw ten punkt tylko, jeśli dany model posiada lateks]: Wyrób zawiera naturalny kauczuk (lateks). Nie stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością lub alergią na ten składnik.

### Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

- Bandaż nie należy owijać zbyt ciasno, aby nie upośledzić krążenia krwi i nie spowodować ucisku nerwów.



- Należy regularnie kontrolować ukrwienie kończyn poniżej założonego opatrunku. W przypadku pojawienia się drętwienia, mrowienia, bólu, zziębnięcia, zasinienia skóry lub narastającego obrzęku, należy natychmiast zdjąć lub poluzować bandaż.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub utrzymywania się objawów niepożądanych, skonsultuj się z personelem medycznym.

Zgodnie z wymogami prawa, każdy poważny incydent związany z wyrobem należy niezwłocznie zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w Polsce.

## Instrukcja użytkownika

### (Aplikacja i usuwanie):

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacją musi być czysta, odtuszczona (np. przemyta alkoholem) i całkowicie sucha. Głębokie owłosienie należy usunąć, aby zapewnić trwałą aplikację i zminimalizować ból przy ściąganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiednią długość taśmy i zaokrąglij jej rogi (zapobiega to strzępieniu się krawędzi). Końce taśmy (tzw. bazy, około 3-5 cm) zawsze naklejaj bez żadnego nacięgu (0%). Naciąg czynniki różnicowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca się wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po nałożeniu potrzyj energicznie powierzchnię taśmy dłońmi, aby wytworzone ciepło aktywowało hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu taśmy z wodą przez 1 godzinę od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, rolując go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem włosów. W celu ułatwienia procesu można wcześniej naszczyć taśmę oliwką kosmetyczną (na 15 minut przed demontażem). Nie zrywaj taśmy gwałtownie.

