

Link do produktu: <https://Selementum.eu/dluga-akumata-polska-mata-do-akupresury-z-poduszka-czarno-zielona-p-86.html>



Długa Akumata – polska mata do akupresury z poduszką – czarno-zielona

Cena	99,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5905123600845

Opis produktu

Mata do akupresury Akumata długa z poduszką – zestaw relaksacyjny

Długa mata do akupresury Akumata z poduszką to kompletny zestaw do domowej regeneracji, zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Dzięki dużej powierzchni roboczej (110 × 43 cm) i 13 230 precyzyjnie rozmieszczonym punktom akupresurowym jednocześnie oddziałuje na plecy, pośladki i uda. Dołączona poduszka z kółkami umożliwia równoległy masaż karku i szyi – wszystko w jednej sesji, bez wychodzenia z domu. Zestaw jest zarejestrowany jako wyrób medyczny i przetestowany przez fizjoterapeutów.

Co zawiera zestaw?

- Długa mata akupresurowa Akumata (czarno-zielona) – 110 × 43 cm
- Poduszka akupresurowa z kółkami – 37 × 15 cm
- Pokrowiec do przechowywania

Jak działa mata do akupresury?

Mata działa na zasadzie akupresury – precyzyjnie rozmieszczone hipoalergiczne kolce z tworzywa HIPS wywierają kontrolowany ucisk na skórę i tkanki powierzchowne. Stymulacja licznych punktów jednocześnie może wspierać miejscowe krążenie krwi oraz przyczyniać się do rozluźnienia napiętych mięśni. Poduszka akupresurowa uzupełnia działanie maty, obejmując trudno dostępną strefę karku i szyi.

Instrukcja użytkowania:

1. Rozłóż matę na płaskiej powierzchni – podłodze, łóżku lub kanapie.
2. Połóż się powoli, równomiernie rozkładając ciężar ciała.
3. Początkujący mogą rozpocząć od 10–15 minut dziennie, najlepiej w cienkiej koszulce.
4. Zaawansowani użytkownicy mogą korzystać z maty 20–40 minut dziennie, bez odzieży. W trakcie korzystania z maty mogą wystąpić specyficzne odczucia, takie jak dyskomfort czy ból, zwłaszcza na początku.
5. Poduszkę można stosować pod głowę, kark lub lędźwie.
6. Podczas stosowania maty konieczne jest zabezpieczenie pieprzyków i brodawek plastrem tak, aby kolce nie naciskały na nie bezpośrednio.
7. Po użyciu przechowuj matę w suchym miejscu i czyść ręcznie wilgotną ściereczką.

Przeciwwskazania: Zestaw nie powinien być stosowany przy przyjmowaniu leków przeciwzakrzepowych, chorobach serca, nowotworach, zaburzeniach krzepliwości krwi, otwartych ranach, uszkodzeniach skóry, oparzeniach słonecznych, chorobach dermatologicznych ani nadwrażliwości skóry. W przypadku ciąży, karmienia piersią lub jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem terapii akupresurowej zaleca się konsultację z lekarzem.



Korzyści dla użytkownika

Mata Akumata sprawdzi się szczególnie u osób, które:

- odczuwają napięcie mięśniowe w okolicy pleców, karku lub barków,
- zmagają się z przewlekłym stresem, zmęczeniem lub trudnościami ze snem,
- prowadzą siedzący tryb życia – pracownicy biurowi, kierowcy,
- są aktywne fizycznie i potrzebują regeneracji po treningu,
- szukają naturalnych metod wspierających relaksację i poprawę krążenia.

Hipoalergiczne kolce o stopniu ostrości odpowiednim zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników sprawiają, że z maty mogą korzystać osoby w każdym wieku. Możliwość użytkowania w pozycji leżącej i siedzącej ułatwia dopasowanie sesji do codziennego rytmu dnia.

Certyfikaty i wiarygodność

- Zarejestrowana jako wyrób medyczny.
- Przetestowana przez specjalistów i fizjoterapeutów.
- Zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce.
- Wykonana z bezpiecznych dla skóry, hipoalergicznych materiałów.

Specyfikacja techniczna

Parametry maty:

Produkcja	Polska
Szerokość	43 cm
Długość	110 cm
Grubość	2 cm
Ilość kolców na rozetce	42
Ilość rozet	315
Ilość punktów akupresurowych	13 230
Materiał	bawełna
Kolce	HIPS
Wypełnienie	gąbka

Parametry poduszki:

Szerokość	15 cm
Długość	37 cm
Grubość	10 cm
Ilość kolców na rozetce	42
Ilość rozet	45
Ilość punktów akupresurowych	1890
Materiał	bawełna
Kolce	HIPS
Wypełnienie	gąbka

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: Acus Med Sp. z o.o. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

