

Link do produktu: <https://5elementum.eu/mediwipes-plus-medilab-chusteczki-do-dezynfekcji-powierzchni-tuba-100-szt-p-166.html>



Mediawipes Plus Medilab – chusteczki do dezynfekcji powierzchni tuba 100 szt.

Cena	22,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5902340981009

Opis produktu

Chusteczki dezynfekcyjne Mediawipes Plus – bakterio-, grzybo- i wirusobójcze, gotowe do użycia

Mediawipes Plus to profesjonalne chusteczki dezynfekcyjne przeznaczone do szybkiej i skutecznej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz powierzchni w gabinetach stomatologicznych i medycznych. Dzięki formule opartej na etanolu (70 g) wykazują potwierdzone działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze – a pierwsze efekty osiągają już po 30 sekundach od aplikacji.

Co zawiera zestaw

- Tuba z chusteczkami dezynfekcyjnymi Mediawipes Plus – 100 sztuk
- Szczelne opakowanie zapobiegające ulatnianiu się substancji dezynfekującej

Jak działają chusteczki Mediawipes Plus – instrukcja użytkowania

Chusteczki są gotowe do użycia natychmiast po otwarciu opakowania – bez rozcieńczania, odmierzania ani przygotowywania roztworu.

1. Otwórz opakowanie i wyjmij jedną chusteczkę.
2. Przetrzyj dokładnie dezynfekowaną powierzchnię lub narzędzie.
3. Odczekaj minimum 30 sekund – nie spłukuj substancji, pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
4. Po użyciu szczelnie zamknij tubę, aby zapobiec wysychaniu pozostałych chusteczek.

Ważne środki ostrożności:

- Nie stosować na powierzchniach akrylowych.
- Produkt zawiera etanol – substancja łatwopalna, chronić przed ogniem i wysoką temperaturą.
- Unikać kontaktu z oczami – może powodować podrażnienie.
- Chusteczki jednorazowego użytku – ponowne użycie grozi zakażeniem krzyżowym.
- Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 3 miesięcy.
- Niewykorzystany produkt i opakowanie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i kartą SDS.

Korzyści dla użytkownika

- **Błyskawiczne działanie** – powierzchnia gotowa do użycia już po 30 sekundach od dezynfekcji.
- **Wygoda i oszczędność czasu** – gotowe do użycia, bez konieczności przygotowywania roztworów.



- **Mycie i dezynfekcja w jednym kroku** – jednocześnie oczyszczają i odkażają powierzchnię.
- **Ekonomiczne użytkowanie** – do dezynfekcji pojedynczego narzędzia wystarczy jedna chusteczka.
- **Brak smug i plam** – nie pozostawiają śladów na dezynfekowanych powierzchniach.
- **Idealne do trudno dostępnych miejsc** – elastyczna forma chusteczki ułatwia aplikację tam, gdzie spray jest niepraktyczny lub niedopuszczalny.
- **Szczelne opakowanie** – substancja dezynfekująca nie ulatnia się, chusteczki zachowują skuteczność przez cały okres użytkowania.

Skuteczność biobójcza

Zakres działania	Czas ekspozycji
Bakteriobójcza, grzybobójcza, prątkobójcza	1 min
Wirusobójcze: HIV/HBV/HCV*	30 s
Adenowirus, Rotawirus, Vacciniawirus, Norowirus	30 s
Poliowirus	5 min
Papowavirus	15 min

Specyfikacja techniczna

- Opakowanie: Tuba 100 szt.
- Skład: etanol 70 g (substancja dezynfekująca)

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: Laboratoires Sarbec | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

