

Link do produktu: <https://5elementum.eu/pileczka-sensoryczna-spiky-ball-line-sport-9-cm-p-92.html>

Piłeczka sensoryczna Spiky Ball Line Sport 9 cm

Cena	10,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5905123605765

Opis produktu

Piłeczka do masażu Spiky Ball Line Sport z wypustkami 9 cm

Sensoryczna piłeczka do masażu Spiky Ball marki Line Sport to kompaktowe i skuteczne narzędzie do codziennego automasażu oraz rozluźniania napiętych mięśni. Wypustki rozmieszczone na całej powierzchni piłeczki umożliwiają głęboką stymulację tkanek – bez wychodzenia z domu i bez potrzeby wizyty u masażyisty. Sprawdzi się zarówno u sportowców szukających wsparcia regeneracji, jak i u osób pracujących przy biurku, które zmagają się z napięciem mięśni pleców, szyi czy karku.

Co zawiera zestaw

- Piłeczka sensoryczna Spiky Ball Line Sport – 1 szt. (kolor zielony)

Jak używać piłeczki Spiky Ball – instrukcja użytkowania

Piłeczkę można stosować na dwa sposoby:

- **Statyczne rozluźnianie punktów spustowych:** przyłóż piłeczkę do bolącego miejsca i utrzymuj nacisk przez około 40 sekund. Metoda skuteczna przy lokalnych napięciach i bolesnych punktach.
- **Automasaż dynamiczny:** przyciśnij piłeczkę do napiętej partii ciała, a następnie powoli przesuwaj ją wzdłuż mięśni. Czynność powtarzaj kilkakrotnie, aż poczujesz rozluźnienie.

Piłeczka sprawdza się do masażu mięśni pleców, szyi, łokci, stóp oraz dłoni – wszędzie tam, gdzie gromadzi się napięcie mięśniowe.

Korzyści dla użytkownika

- Zmniejsza napięcie mięśniowe i przynosi ulgę zmęczonym mięśniom
- Wspomaga regenerację po treningu i aktywności fizycznej
- Usprawnia krążenie w masowanych partiach ciała
- Pobudza receptory czuciowe dzięki wypustkom na powierzchni
- Wspiera rehabilitację i może zwiększać motorykę po urazach oraz operacjach
- Wzmacnia mięśnie przy regularnym stosowaniu
- Kompaktowy rozmiar – łatwa do zabrania na trening, w podróż lub do pracy

Specyfikacja techniczna

- **Marka:** Line Sport



- **Średnica:** 9 cm
- **Kolor:** zielony
- **Materiał:** tworzywo PVC

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: Acus Med Sp. z o.o. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

