

Link do produktu: <https://5elementum.eu/tejpy-5e-bawelniane-speed-niebieskie-p-11.html>

Taśma kinezyjologiczna Bawełniana (SPEED) - niebieska

| | |
|--------------|----------------------|
| Cena | 20,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Kod EAN | 5905108022013 |

Opis produktu

Tejpy 5e Bawełniane SPEED w kolorze niebieskim – Klasyczne wsparcie na co dzień

Szukasz sprawdzonego, naturalnego rozwiązania, które wesprze Twój układ ruchu w codziennych aktywnościach?

Tejpy 5e bawełniane SPEED to nasz flagowy, klasyczny wyrób medyczny. Stworzyliśmy go z myślą o osobach, które cenią sobie komfort, oddychalność materiału i delikatność dla skóry.

To idealny wybór do standardowych aplikacji, zarówno dla pacjentów gabinetów fizjoterapeutycznych, jak i do użytku domowego. Poznaj taśmę, która naśladuje właściwości ludzkiej skóry i zapewnia mechaniczne wsparcie dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Komfort noszenia - jak długo taśma zostaje na ciele?



MATERIAŁ: BAWĘLNA

- antyalergiczne
- komfort noszenia 1-3 dni
- rozciągliwość 140%




Wybierając **tejpy 5e z bawełny**, decydujesz się na produkt przeznaczony do codziennego wsparcia. Dzięki wysokiej jakości splotu i bezpiecznemu klejowi, **komfort noszenia wynosi od 1 do 3 dni**. To optymalny czas, w którym materiał zachowuje swoje właściwości wspierające, nie obciążając przy tym nadmiernie naskórka.

Tejpy 5e Bawełniane SPEED w kolorze niebieskim - Klasyczne wsparcie na co dzień

Szukasz sprawdzonego, naturalnego rozwiązania, które wesprze Twój układ ruchu w codziennych aktywnościach? **Tejpy 5e bawełniane SPEED** to nasz flagowy, klasyczny wyrób medyczny. Stworzyliśmy go z myślą o osobach, które cenią sobie komfort, oddychalność materiału i delikatność dla skóry.

To idealny wybór do standardowych aplikacji, zarówno dla pacjentów gabinetów fizjoterapeutycznych, jak i do użytku domowego. Poznaj taśmę, która naśladuje właściwości ludzkiej skóry i zapewnia mechaniczne wsparcie dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

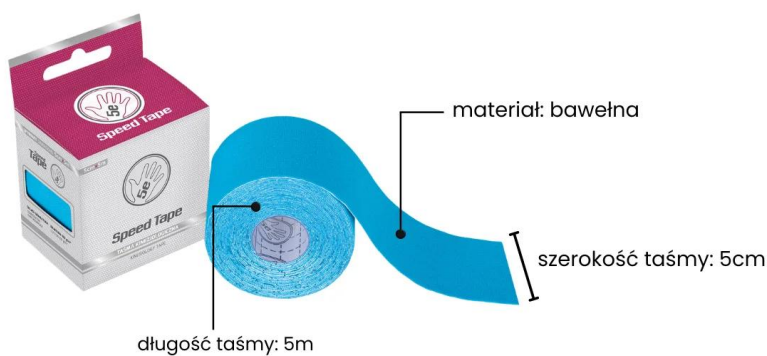


| Parametr | Opis |
|--------------|--------------------------------|
| Seria | SPEED TAPE (Klasyczna Bawełna) |
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | 100% Bawełna klasy Premium |
| Elastyczność | do 140% |
| Klej | Medyczny akryl (bezlątekowy) |
| Wymiary | 5 cm x 5 m (rolka standardowa) |

Co wyróżnia plastry bawełniane SPEED?

Każda rolka z serii SPEED została zaprojektowana tak, aby zapewnić optymalny balans między elastycznością a trwałością. Zamiast syntetycznych zamienników, postawiliśmy na klasykę, która sprawdza się od lat. Co dokładnie znajdziesz w tym produkcie?



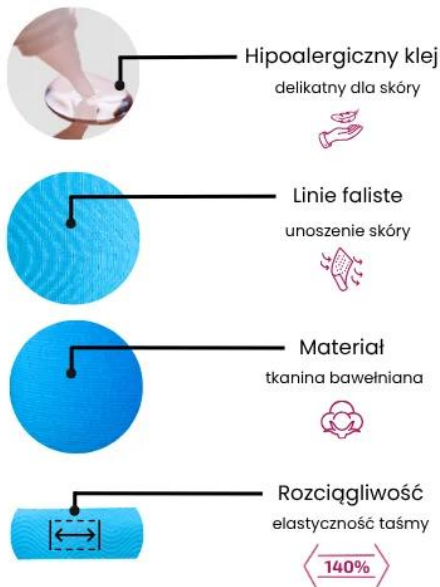


Hipoalergiczny klej: Akrylowe spoiwo jest delikatne dla naskórka i minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień. Produkt jest antyalergiczny i nie zawiera lateksu.

Linie faliste: Klej nie jest nałożony jednolicie. Falisty wzór sprawia, że taśma mechanicznie unosi naskórek. Zwiększa to przestrzeń między tkankami, co w fizjoterapii wykorzystuje się do wspomagania mikrokrążenia.

Materiał: Bawełna. Naturalna tkanina zapewnia doskonałą przepuszczalność powietrza, dzięki czemu skóra pod plasterem może swobodnie oddychać.

Rozciągliwość 140%. To nie jest przypadkowa wartość. Elastyczność taśmy na poziomie 140% jest zbliżona do naturalnej elastyczności ludzkiej skóry, co pozwala na pełen zakres ruchu.

Precyzyjne docinanie dzięki siatce na podkładzie

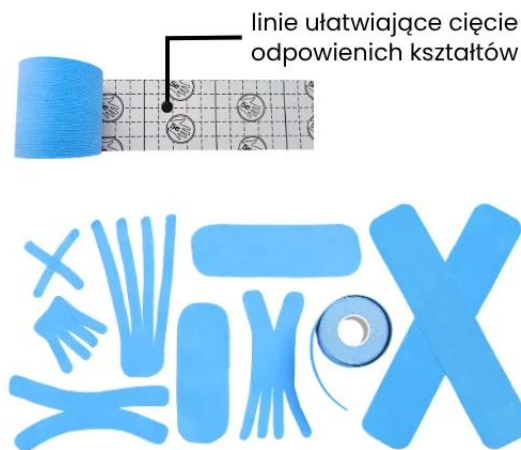

Przygotowanie odpowiedniej aplikacji wymaga precyzji. Aby ułatwić Ci pracę, na papierze zabezpieczającym umieściliśmy praktyczną siatkę z logo 5e. Równe **linie ułatwiające cięcie** pomogą Ci szybko i dokładnie odmierzyć pożądaną długość materiału.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz klasycznego paska (kształt "I"), rozwidlenia (kształt "Y" lub "X"), czy skomplikowanego wachlarza do aplikacji limfatycznych – siatka na podkładzie gwarantuje równe krawędzie i oszczędność materiału przy



każdym cięciu.

Certyfikaty:



Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE



Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I



TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

Czytaj więcej

Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

Przewidziane Zastosowanie:

Taśmy kinezyologiczne to wyrób medyczny przeznaczony do wspomagania układu ruchu i naturalnych procesów regeneracyjnych poprzez mechaniczne działanie na tkanki. Stosuje się je wspomagająco w przypadku:

- łagodzenia dolegliwości bólowych narządu ruchu,
- redukcji obrzęków i zastoju limfatycznego,
- stabilizacji stawów (m.in. po urazach, nacignięciach i skręceniach),
- łagodzenia objawów towarzyszących chorobom zwyrodnieniowym oraz dysfunkcjom układu krwionośnego i limfatycznego.

Zalety metody kinesiotapingu:

- szerokie i wielorakie zastosowanie wspomagające układ mięśniowo-szkieletowy,
- działanie oparte na właściwościach mechanicznych – metoda wolna od substancji farmakologicznych (nie obciąża układu pokarmowego),



- wspiera naturalne procesy regeneracyjne organizmu po urazach,
- może przyczyniać się do zwiększenia zakresu ruchu w stawie,
- zapobieganie przeciwnom i wsparcie w profilaktyce kontuzji,
- możliwość stosowania u dorosłych oraz u dzieci (wyłącznie po instruktażu specjalisty),
- możliwość samodzielnej aplikacji w warunkach domowych (zalecane po uprzedniej konsultacji z fizjoterapeutą),
- długi okres użytkowania (pojedyncza aplikacja może utrzymywać się na skórze przez kilka dni).

Przeciwwskazania:

Wyrobu bezwzględnie nie należy stosować na otwarte rany, zdrapania, pęcherze, oparzenia słoneczne, skórę objętą aktywną infekcją, stanem zapalnym lub owrzodzeniem. Nie stosować przy stwierdzonej zakrzepicy żył głębokich oraz w przypadku znanej nadwrażliwości / alergii na klej poliakrylowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku wystąpienia w miejscu aplikacji silnego zaczerwienienia, pieczenia, uporczywego swędzenia lub pęcherzy (odczyny alergiczne lub mechaniczne uszkodzenie skóry), należy natychmiast usunąć taśmę i przemyć skórę. Jeśli objawy nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem. Próba ponownego użycia tej samej taśmy po jej odklejeniu jest nieskuteczna (utrata właściwości adhezyjnych kleju) i stwarza ryzyko infekcji.

Zgłaszanie incydentów:

Každy poważny incydent, jaki wystąpi w związku z niniejszym wyrobem, należy zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz właściwemu organowi nadzorcemu. W Polsce jest to Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Instrukcja użytkowania

Aplikacja i usuwanie:

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacją musi być czysta, oduszczona (np. przemyta alkoholem) i całkowicie sucha. Głębokie owłosienie należy usunąć, aby zapewnić trwałość aplikacji i zminimalizować ból przy ściąganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiednią długość taśmy i zaokrąglij jej rogi (zapobiega to strzępieniu się krawędzi). Końce taśmy (tzw. bazy, około 3-5 cm) zawsze naklejaj bez żadnego nacięgu (0%). Nacięgi czwartej części rodowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca się wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po nałożeniu potrzyj energicznie powierzchnię taśmy dłońmi, aby wytworzone ciepło aktywowało hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu taśmy z wodą przez 1 godzinę od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, rolując go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem



w?osa. W celu u?atwienia procesu mo?na wcze?niej nas?czy? ta?m? oliwk? kosmetyczn? (na 15 minut przed demonta?em). Nie zrywaj ta?my gwa?townie.

