

Link do produktu: <https://5elementum.eu/tejpy-5e-bawelniane-speed-rozowe-p-13.html>



Taśma kinezyjologiczna Bawełniana (SPEED) - różowa

Cena	20,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5905108022006

Opis produktu


Tejpy 5e Bawełniane SPEED w kolorze różowym – Klasyczne wsparcie na co dzień

Szukasz sprawdzonego, naturalnego rozwiązania, które wesprze Twój układ ruchu w codziennych aktywnościach? **Tejpy 5e bawełniane SPEED** to nasz flagowy, klasyczny wyrób medyczny. Stworzyliśmy go z myślą o osobach, które cenią sobie komfort, oddychalność materiału i delikatność dla skóry.

To idealny wybór do standardowych aplikacji, zarówno dla pacjentów gabinetów fizjoterapeutycznych, jak i do użytku domowego. Poznaj taśmę, która naśladuje właściwości ludzkiej skóry i zapewnia mechaniczne wsparcie dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Komfort noszenia - jak długo taśma zostaje na ciele?



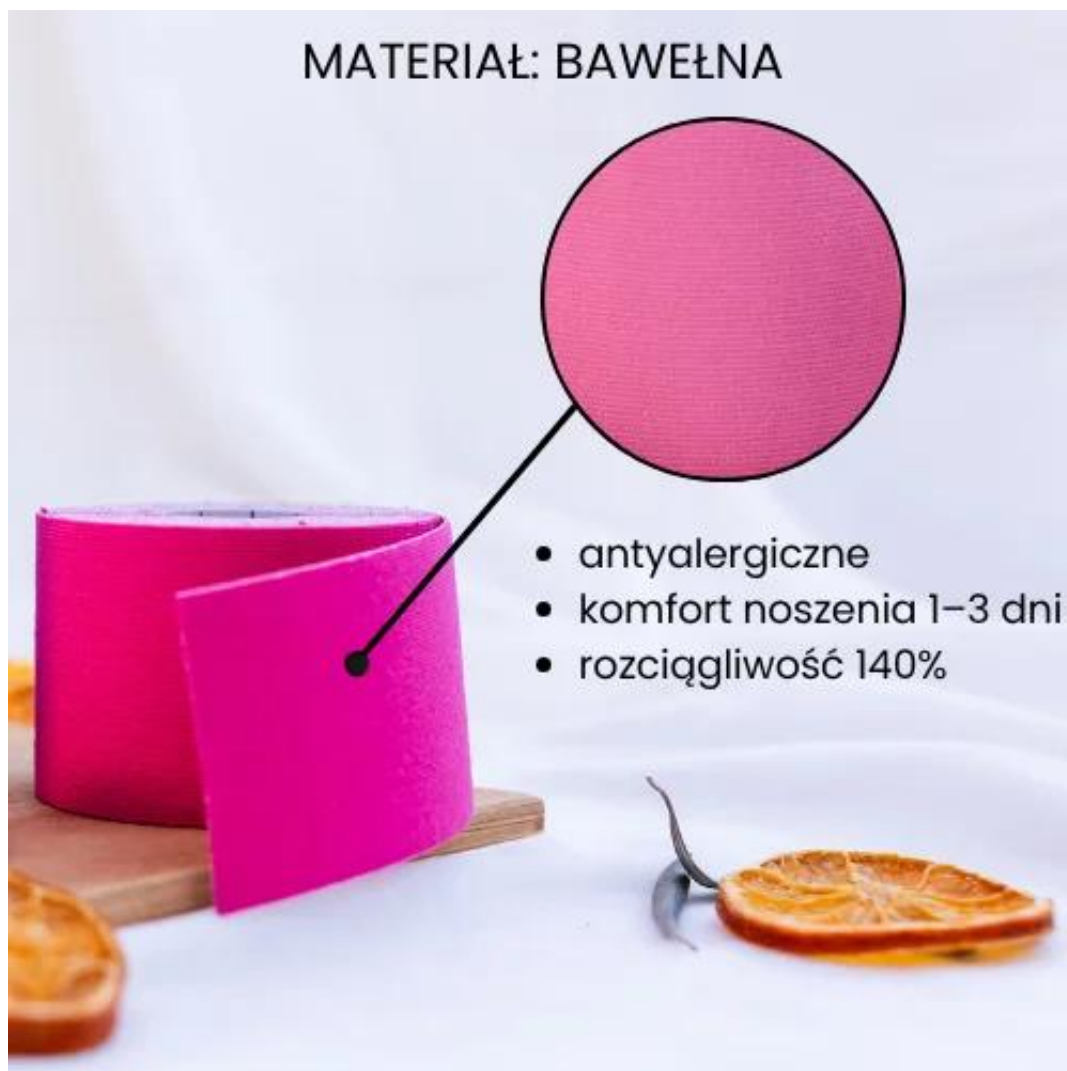


Wybierając **tejpy 5e z bawełny**, decydujesz się na produkt przeznaczony do codziennego wsparcia. Dzięki wysokiej jakości splotu i bezpiecznemu klejowi, **komfort noszenia wynosi od 1 do 3 dni**. To optymalny czas, w którym materiał zachowuje swoje właściwości wspierające, nie obciążając przy tym nadmiernie naskórka.

Tejpy 5e Bawełniane SPEED w kolorze różowym - Klasyczne wsparcie na co dzień

Szukasz sprawdzonego, naturalnego rozwiązania, które wesprze Twój układ ruchu w codziennych aktywnościach? **Tejpy 5e bawełniane SPEED** to nasz flagowy, klasyczny wyrób medyczny. Stworzyliśmy go z myślą o osobach, które cenią sobie komfort, oddychalność materiału i delikatność dla skóry.

To idealny wybór do standardowych aplikacji, zarówno dla pacjentów gabinetów fizjoterapeutycznych, jak i do użytku domowego. Poznaj taśmę, która naśladuje właściwości ludzkiej skóry i zapewnia mechaniczne wsparcie dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.



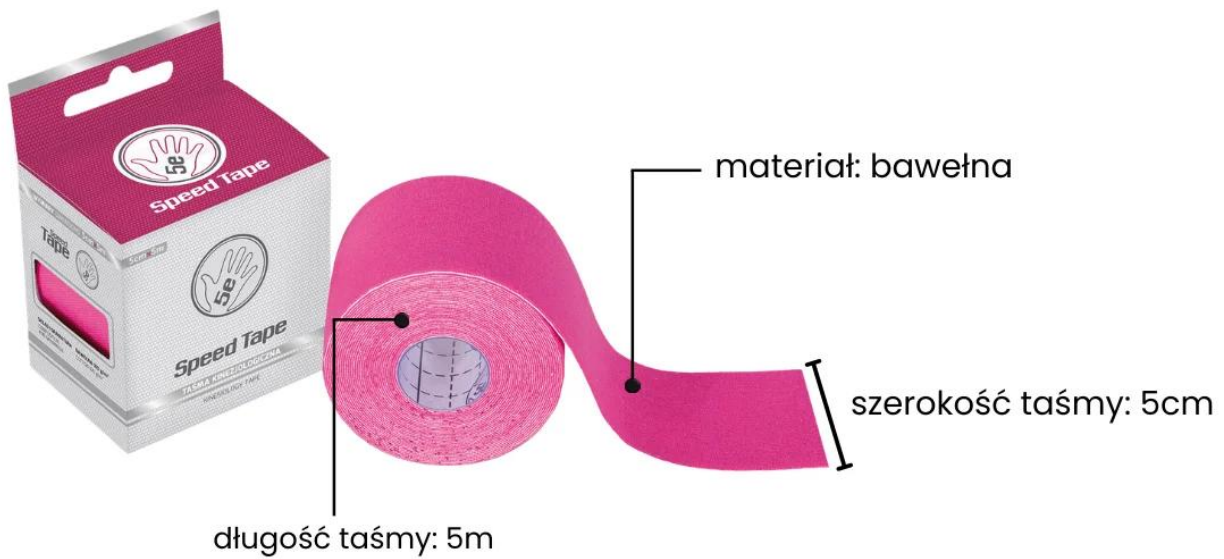

Parametr	Opis
Seria	SPEED TAPE (Klasyczna Bawełna)
Kolor	Różowy
Materiał	100% Bawełna klasy Premium
Elastyczność	do 140%
Klej	Medyczny akryl (bezlakosowy)
Wymiary	5 cm x 5 m (rolka standardowa)

Co wyróżnia plastry bawełniane SPEED w kolorze różowym?

Każda rolka z serii SPEED została zaprojektowana tak, aby zapewnić optymalny balans między elastycznością a trwałością. Zamiast syntetycznych zamienników, postawiliśmy na klasykę, która sprawdza się od lat. Co dokładnie znajdziesz w tym produkcie?





Hipoalergiczny klej: Akrylowe spoiwo jest delikatne dla naskórka i minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień. Produkt jest antyalergiczny i nie zawiera lateksu.


Linie faliste: Klej nie jest nałożony jednolicie. Falisty wzór sprawia, że taśma mechanicznie unosi naskórek. Zwiększa to przestrzeń między tkankami, co w fizjoterapii wykorzystuje się do wspomagania mikrokrążenia.

Materiał: Bawełna. Naturalna tkanina zapewnia doskonałą przepuszczalność powietrza, dzięki czemu skóra pod plastrem może swobodnie oddychać.

Rozciągliwość 140%. To nie jest przypadkowa wartość. Elastyczność taśmy na poziomie 140% jest zbliżona do naturalnej elastyczności ludzkiej skóry, co pozwala na pełen zakres ruchu.

Precyzyjne docinanie dzięki siatce na podkładzie



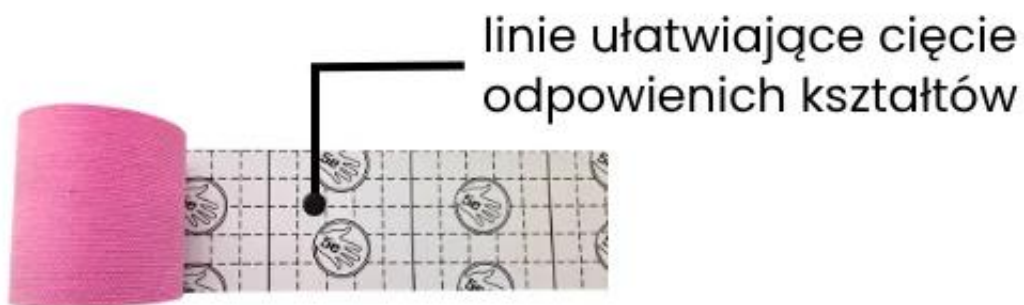

Przygotowanie odpowiedniej aplikacji wymaga precyzji. Aby ułatwić Ci pracę, na papierze zabezpieczającym umieściliśmy praktyczną siatkę z logo 5e. Równe **linie ułatwiające cięcie** pomogą Ci szybko i dokładnie odmierzyć pożądaną długość materiału.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz klasycznego paska (kształt "I"), rozwidlenia (kształt "Y" lub "X"), czy skomplikowanego wachlarza do aplikacji limfatycznych - siatka na podkładzie gwarantuje równe krawędzie i oszczędność materiału przy każdym cięciu.



Certyfikaty:

Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE

Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I





TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

Czytaj więcej

Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

Przewidziane Zastosowanie:

Ta?my kinezjologiczne to wyrób medyczny przeznaczony do wspomagania uk?adu ruchu i naturalnych procesów regeneracyjnych poprzez mechaniczne dzia?anie na tkanki. Stosuje si? je wspomagaj?co w przypadku:

- ?agodzenia dolegliwo?ci bólowych narz?du ruchu,
- redukcji obrz?ków i zastojów limfatycznych,
- stabilizacji stawów (m.in. po urazach, naci?gni?ciach i skr?ceniach),
- ?agodzenia objawów towarzyszc?cych chorobom zwyrodnieniowym oraz dysfunkcjom uk?adu krwiono?nego i limfatycznego.

Zalety metody kinesiotapingu:

- szerokie i wielorakie zastosowanie wspomagaj?ce uk?ad mi??niowo-szkieletowy,
- dzia?anie oparte na w?a?ciwo?ciach mechanicznych – metoda wolna od substancji farmakologicznych (nie obci??a uk?adu pokarmowego),
- wspiera naturalne procesy regeneracyjne organizmu po urazach,
- mo?e przyczynia? si? do zwi?kszenia zakresu ruchu w stawie,
- zapobieganie przeci??eniom i wsparcie w profilaktyce kontuzji,
- mo?liwo?? stosowania u doros?ych oraz u dzieci (wy??cznie po instrukta?u specjalisty),
- mo?liwo?? samodzielnej aplikacji w warunkach domowych (zalecane po uprzedniej konsultacji z fizjoterapeut?),
- d?ugi okres u?tkowania (pojedyncza aplikacja mo?e utrzymywa? si? na skórze przez kilka dni).

Przeciwwskazania:

Wyrobu bezwzgl?dnie nie nale?y stosowa? na otwarte rany, zadrapania, p?cherze, oparzenia s?oneczne, skór? obj?t? aktywn? infekcj?, stanem zapalnym lub owrzodzeniem. Nie stosowa? przy stwierdzonej zakrzepicy ?y?



głębokich oraz w przypadku znanej nadwrażliwości / alergii na klej poliakrylowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku wystąpienia w miejscu aplikacji silnego zaczerwienienia, pieczenia, uporczywego łupieżu lub pęcherzy (odczyny alergiczne lub mechaniczne uszkodzenie skóry), należy natychmiast usunąć taśmę i przemyć skórę. Jeżeli objawy nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem. Próba ponownego użycia tej samej taśmy po jej odklejeniu jest nieskuteczna (utrata właściwości adhezyjnych kleju) i stwarza ryzyko infekcji.

Zgłaszanie incydentów:

Każdy poważny incydent, jaki wystąpi w związku z niniejszym wyrobem, należy zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz właściwemu organowi nadzorczemu. W Polsce jest to Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Instrukcja użytkowania

Aplikacja i usuwanie:

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacją musi być czysta, odkażona (np. przemyta alkoholem) i całkowicie sucha. Głębokie owłosienie należy usunąć, aby zapewnić trwałość aplikacji i zminimalizować ból przy ściąganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiednią długość taśmy i zaokrąglij jej rogi (zapobiega to strzępieniu się krawędzi). Końce taśmy (tzw. bazy, około 3-5 cm) zawsze naklejaj bez żadnego nacięcia (0%). Nacięcie czyszczonej rodkowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca się wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po nałożeniu potrzyj energicznie powierzchnię taśmy dłońmi, aby wytworzone ciepło aktywowało hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu taśmy z wodą przez 1 godzinę od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, rolując go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem włosów. W celu ułatwienia procesu można wcześniej naszczyć taśmę oliwką kosmetyczną (na 15 minut przed demontażem). Nie zrywaj taśmy gwałtownie.

