

Link do produktu: <https://5elementum.eu/tejpy-5e-do-biustu-bawelniane-bezowe-p-48.html>



## Taśma na Biust Bawełniana (BOOB TAPE) - beżowa

Cena	<b>25,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>

### Opis produktu

#### Tejpy 5e BOOB Bawełniane – Naturalne wsparcie i oddychalność

Szukasz bezpiecznego i naturalnego materiału, który zapewni Ci komfortowe wsparcie w wymagających obszarach? **Tejpy 5e BOOB w wariancie bawełnianym** to certyfikowany wyrób medyczny stworzony z myślą o delikatnej skórze.

Wykorzystaliśmy tu naszą sprawdzoną, oddychającą bazę z klasycznej bawełny, dopasowując ją do potrzeb miejsc wymagających stabilnego, a zarazem łagodnego mechanicznego podtrzymania.

To doskonały wybór dla kobiet, które cenią sobie naturalne tkaniny i poszukują wsparcia naśladującego właściwości ludzkiej skóry, bez rezygnacji z przepuszczalności powietrza.

#### Właściwości materiału - potęga klasycznej bawełny

Skóra w okolicach dekoltu jest niezwykle cienka i wrażliwa na obciążenia. Zbliżenie na strukturę naszej bawełnianej taśmy ukazuje jej główne zalety:





**Naturalna tkanina:** Wysokiej jakości bawełna, która jest przyjazna w dotyku i zapewnia dobrą cyrkulację powietrza.

**Oddychalność:** Materiał nie blokuje dostępu powietrza do naskórka, co jest kluczowe przy noszeniu aplikacji przez wiele godzin.

**Komfortowe wsparcie:** Naturalny splot sprawdza się jako stabilizator mechaniczny, nie obciążając przy tym nadmiernie delikatnych tkanek.


---

### Wymiary i wydajność rolki

Odpowiednia ilość materiału pozwala na wykonanie kilku precyzyjnych aplikacji.

W dedykowanym opakowaniu znajdziesz bezpiecznie zapakowaną rolkę bawełnianą w neutralnym, beżowym kolorze.



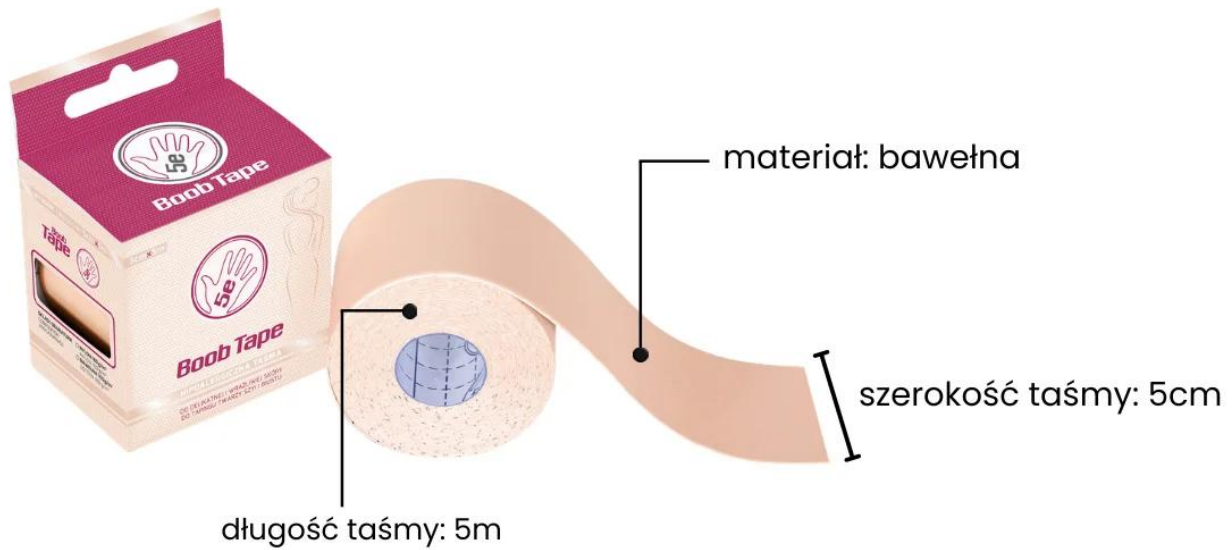

Parametry	Opis
Seria	TAPE BOOB (Body Contouring Series)
Kolor	Niebieski (Blue)
Materiał	Bawełna klasy Premium + Elastan
Klej	Medyczny akryl (odporny na wilgoć i pot)
Wymiary	5 cm x 5 m (wystarcza na wiele aplikacji)

## Specyfikacja BOOB Bawełna - bezpieczny klej i elastyczność

W produkcie mającym bezpośredni kontakt z bardzo delikatną skórą, jakość spoiwa jest najważniejsza. Zastosowaliśmy tu precyzyjnie dobrane parametry techniczne:





**Hipoalergiczny klej:** Bezpieczne spoiwo akrylowe niezawierające lateksu, stworzone z myślą o zminimalizowaniu ryzyka podrażnień.


**Linie faliste:** Klej ułożony jest we wzór wspierający mechaniczne unoszenie skóry, co poprawia komfort noszenia.

**Materiał: Bawełna.** Naturalna tkanina zapewnia doskonałą przepuszczalność powietrza, dzięki czemu skóra pod plasterem może swobodnie oddychać.

**Rozciągliwość 140%:** Elastyczność taśmy została dobrana tak, aby naśladować naturalną rozciągliwość skóry, nie powodując nadmiernego ucisku.

## Precyzyjne docinanie aplikacji



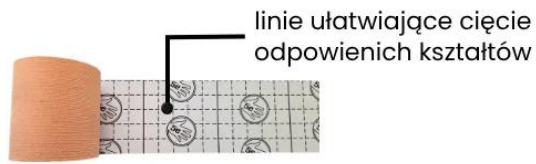

Przygotowanie plastrów na obszary wrażliwe wymaga odpowiedniego przygotowania kształtów. Aby ułatwić Ci tę pracę, papier podkładowy został wyposażony w praktyczną siatkę z logo 5e.

Wyraźne **linie ułatwiające cięcie** pomogą Ci idealnie odmierzyć i wyciąć równe pasy, zachowując estetyczne krawędzie i optymalizując zużycie rolki.

### Certyfikaty:



Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE



Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I



TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

Czytaj więcej



## Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

### Przewidziane Zastosowanie:

Taśmy kinezyjologiczne to wyrób medyczny przeznaczony do wspomagania układu ruchu i naturalnych procesów regeneracyjnych poprzez mechaniczne działanie na tkanki. Stosuje się je wspomagająco w przypadku:

- łagodzenia dolegliwości bólowych narządu ruchu,
- redukcji obrzęków i zastoju limfatycznych,
- stabilizacji stawów (m.in. po urazach, naciśnięciach i skręceniach),
- łagodzenia objawów towarzyszących chorobom zwyrodnieniowym oraz dysfunkcjom układu krwionośnego i limfatycznego.

### Zalety metody kinesiotapingu:

- szerokie i wielorakie zastosowanie wspomagające układ mięśniowo-szkieletowy,
- działanie oparte na właściwościach mechanicznych – metoda wolna od substancji farmakologicznych (nie obciąża układu pokarmowego),
- wspiera naturalne procesy regeneracyjne organizmu po urazach,
- może przyczynić się do zwiększenia zakresu ruchu w stawie,
- zapobieganie przeciwnom i wsparcie w profilaktyce kontuzji,
- możliwość stosowania u dorosłych oraz u dzieci (wyłącznie po instruktażu specjalisty),
- możliwość samodzielnej aplikacji w warunkach domowych (zalecane po uprzedniej konsultacji z fizjoterapeutą),
- długi okres użytkowania (pojedyncza aplikacja może utrzymywać się na skórze przez kilka dni).

### Przeciwwskazania:

Wyrobu bezwzględnie nie należy stosować na otwarte rany, zdrapania, pęcherze, oparzenia słoneczne, skórę objętą aktywną infekcją, stanem zapalnym lub owrzodzeniem. Nie stosować przy stwierdzonej zakrzepicy żył głębokich oraz w przypadku znanej nadwrażliwości / alergii na klej poliakrylowy.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku wystąpienia w miejscu aplikacji silnego zaczerwienienia, pieczenia, uporczywego swędzenia lub pęcherzy (odczyny alergiczne lub mechaniczne uszkodzenie skóry), należy natychmiast usunąć taśmę i przemyć skórę. Jeśli objawy nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem. Próba ponownego użycia tej samej taśmy po jej odklejeniu jest nieskuteczna (utrata właściwości adhezyjnych kleju) i stwarza ryzyko infekcji.



## Zgłaszanie incydentów:

Ka?dy powa?ny incydent, jaki wyst?pi? w zwi?zku z niniejszym wyrobem, nale?y zg?osi? Producentowi, Dystrybutorowi (SE) oraz w?a?ciwemu organowi nadzorcemu. W Polsce jest to Prezes Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

## Instrukcja u?ytkowania

### Aplikacja i usuwanie:

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacj? musi by? czysta, odt?uszczona (np. przemyta alkoholem) i ca?kowicie sucha. G?ste ow?osienie nale?y usun??, aby zapewni? trwa?o?? aplikacji i zminimalizowa? ból przy ?ci?ganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiedni? d?ugo?? ta?my i zaokr?gluj jej rogi (zapobiega to strz?pieniu si? kraw?dzi). Ko?ce ta?my (tzw. bazy, oko?o 3-5 cm) zawsze naklejaj bez ?adnego naci?gu (0%). Naci?g cz??ci ?rodkowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca si? wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po na?o?eniu potrzyj energicznie powierzchni? ta?my d?oni?, aby wytworzone ciep?o aktywowa?o hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu ta?my z wod? przez 1 godzin? od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, roluj?c go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem w?osa. W celu u?atwienia procesu mo?na wcze?niej nas?czy? ta?m? oliwk? kosmetyczn? (na 15 minut przed demonta?em). Nie zrywaj ta?my gwa?townie.

