

Link do produktu: <https://5elementum.eu/velox-duo-wipes-medisept-chusteczki-do-dezynfekcji-powierzchni-i-sprzetu-medycznego-wklad-100-szt-p-161.html>



Velox Duo Wipes Medisept – chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wkład 100 szt.

Cena	18,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5907626637595

Opis produktu

Chusteczki do dezynfekcji Velox Duo Wipes Medisept – skuteczne i szybkie w działaniu

Velox Duo Wipes to profesjonalne alkoholowe chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego marki Medisept. Eliminują bakterie, grzyby, prątki gruźlicy oraz szerokie spektrum wirusów – w tym SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV i wirusy Rota oraz Noro. Grzyby zwalczają już w 15 sekund. Skuteczność potwierdzona badaniami, materiał przebadany dermatologicznie – to chusteczki stworzone z myślą o profesjonalnym użytku w wymagających środowiskach.

Co zawiera zestaw

- Wkład 100 sztuk chusteczek alkoholowych Velox Duo Wipes
- Chusteczki wykonane z włókniny o wymiarach 13 x 20 cm
- Gramatura materiału: 23 g/m²
- Zapach: tea tonic

Produkt dostępny również w wariantach: flow pack 50 szt. oraz puszka 100 szt.

Jak działają chusteczki Velox Duo Wipes – instrukcja użytkowania

- Przetrzyj dezynfekowaną powierzchnię chusteczką i odczekaj 30 sekund – w warunkach brudnych czas działania może wynosić do 60 sekund (dotyczy wirusów oślonkowych i rotawirusów).
- Dezynfekowanej powierzchni nie trzeba spłukiwać wodą. Wyjątek stanowią blaty i stoły mające kontakt z żywnością – po dezynfekcji należy je dokładnie spłukać wodą pitną.
- Po użyciu szczelnie zamknij opakowanie – suche chusteczki nie nadają się do stosowania. Produkt zużyj w ciągu 21 dni od otwarcia.
- Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe).

Chusteczki skutecznie zwalczają:

- bakterie, w tym MRSA
- grzyby (C. albicans) – już w 15 sekund
- prątki gruźlicy (M. terrae)
- wirusy oślonkowe: HBV, HCV, HIV, Vaccinia, SARS-CoV-2, Herpes Simplex, Ebola
- wirusy: BVDV, Rota i Noro

Korzyści dla użytkownika



Velox Duo Wipes sprawdzają się wszędzie tam, gdzie liczy się szybka i skuteczna dezynfekcja – bez konieczności przygotowywania roztworów czy użycia dodatkowego sprzętu. Jedna chusteczka wystarczy, by w kilkanaście sekund oczyścić i odświeżyć powierzchnię, eliminując przy tym szerokie spektrum drobnoustrojów.

- **Szybkie działanie** – grzyby eliminują już w 15 sekund, bakterie i wirusy w 30–60 sekund
- **Wygoda użycia** – gotowe do użycia, nie wymagają rozcieńczania ani splukiwania
- **Ekonomiczność** – duży format chusteczki (13 x 20 cm) pozwala na efektywne pokrycie powierzchni
- **Szerokie zastosowanie** – nadają się do dezynfekcji sprzętu medycznego, łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej, końcówek stomatologicznych, łyżek protetycznych, blatów i stołów
- **Bezpieczny materiał** – włóknina przebadana dermatologicznie

Chusteczki przeznaczone są do użytku w:

- szpitalach i przychodniach
- gabinetach zabiegowych i specjalistycznych
- gabinetach stomatologicznych
- domach opieki i sanatoriach
- gabinetach fizjoterapeutów i masażyстів
- salonach fitness, SPA i siłowniach
- salonach kosmetycznych i fryzjerskich
- obiektach gastronomicznych

Certyfikaty i wiarygodność

Chusteczki Velox Duo Wipes marki Medisept posiadają potwierdzoną badaniami skuteczność biobójczą. Materiał (włóknina) jest przebadany dermatologicznie, co potwierdza jego bezpieczeństwo w codziennym, profesjonalnym użytkowaniu.

Parametry

- **Producent:** Medisept
- **Opakowanie:** wkład 100 sztuk
- **Zapach:** tea tonic
- **Chusteczki:**
 - włókninowe
 - 13 x 20 cm
 - gramatura – 23 g/m²

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: MEDISEPT Sp. z o.o. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

