

Link do produktu: <https://Selementum.eu/velox-foam-extra-medisept-bezalkoholowa-pianka-do-dezynfekcji-powierzchni-1l-p-123.html>



Velox Foam Extra Medisept – bezalkoholowa pianka do dezynfekcji powierzchni 1L

Cena	29,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5907626633405

Opis produktu

Velox Foam Extra Medisept – bezalkoholowa pianka do dezynfekcji powierzchni

Velox Foam Extra to gotowa do użycia, bezalkoholowa pianka dezynfekcyjna o szerokim spektrum działania. Niszczy bakterie, grzyby i wirusy już w 1 minutę, a prątki gruźlicy w 5 minut – bez konieczności spłukiwania wodą. Dzięki braku aldehydów, fosforanów i alkoholu jest bezpieczna dla szerokiej gamy materiałów, w tym tworzyw sztucznych ABS i materiałów obiciowych. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się skuteczność, szybkość działania i bezpieczeństwo dla dezynfekowanych powierzchni.

Co zawiera zestaw

- Velox Foam Extra – pianka dezynfekcyjna 1 l ze spryskiwaczem atomizującym

Jak stosować Velox Foam Extra

Produkt jest gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania ani przygotowania.

- Trzymaj atomizer w odległości 20-30 cm od dezynfekowanej powierzchni.
- Nanieś piankę równomiernie tak, aby pokryła całą powierzchnię.
- Odczekaj wymagany czas kontaktu (1 minuta – bakterie, grzyby, wirusy; 5 minut – prątki gruźlicy).
- Nadmiar pianki usuń ręcznikiem papierowym.
- Nie spłukuj wodą.

Środki ostrożności: W przypadku kontaktu ze skórą umyj dokładnie ręce wodą z mydłem. Przy kontakcie z oczami przepłucz je wodą; jeśli podrażnienie utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem. Przed każdym użyciem zapoznaj się z etykietą produktu.

Korzyści dla użytkownika

- **Błyskawiczna dezynfekcja** – skuteczna już po 1 minucie, co skraca czas między zabiegami i zwiększa efektywność pracy.
- **Bezpieczna dla materiałów** – nie odbarwia, nie niszczy tworzyw ABS, gumy, metalu, szkła, porcelany, akrylu ani materiałów obiciowych.
- **Bez alkoholu, aldehydów i fosforanów** – mniejsze ryzyko podrażnień i uszkodzeń wrażliwych powierzchni oraz sprzętu medycznego.
- **Gotowa do użycia** – oszczędza czas, eliminuje ryzyko błędów przy rozcieńczaniu.
- **Ekonomiczna w użyciu** – pianka równomiernie pokrywa powierzchnię, minimalizując zużycie preparatu.
- **Przyjemny zapach cytrusowy** – komfort pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
- **Szerokie zastosowanie** – sprawdza się w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, weterynaryjnych,



placówkach publicznych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest regularna dezynfekcja powierzchni.

Velox Foam Extra jest szczególnie polecana do dezynfekcji foteli zabiegowych, inkubatorów, lamp zabiegowych, blatów, sprzętu medycznego oraz wszelkich powierzchni ze szkła, porcelany, metalu, gumy i tworzyw sztucznych.

Certyfikaty i wiarygodność

- Przebadana zgodnie z aktualnymi normami dla środków do dezynfekcji.
- Posiada rekomendację Instytutu Centrum Matki i Dziecka.
- Posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed.

Specyfikacja techniczna

- Pojemność: 1 l ze spryskiwaczem
- Forma: pianka w sprayu (atomizer)
- Zawartość substancji czynnych w 100 g:
 - 0,02 g – N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina
 - 0,02 g – Poli(oksy-1,2-etanodilo), .alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól)
- Bez alkoholu, aldehydów, fosforanów
- Nie wymaga spłukiwania
- Produkt gotowy do użycia

