

Link do produktu: <https://Selementum.eu/velox-top-af-medisept-spray-do-dezynfekcji-powierzchni-i-sprzetu-medycznego-1l-p-129.html>



Velox Top AF Medisept - spray do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego 1L

Cena	32,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5907626633924

Opis produktu

Velox Top AF – spray dezynfekujący do powierzchni medycznych i kosmetycznych, 1 L

Velox Top AF to gotowy do użycia preparat dezynfekujący w sprayu, stworzony z myślą o szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego i kosmetycznego. Działa w zaledwie 30 sekund, nie zawiera aldehydów ani fenoli, a dzięki delikatnemu cytrusowemu zapachowi i braku efektu odbarwienia – sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się zarówno skuteczność, jak i bezpieczeństwo materiałów.

Co zawiera zestaw

- Velox Top AF spray dezynfekujący – butelka 1 L ze spryskiwaczem

Cechy produktu

- Szerokie spektrum mikrobójcze – działa już w 30 sekund
- Wyjątkowe właściwości myjące – jednocześnie czyści i dezynfekuje
- Gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania ani przygotowania
- Bez aldehydów i fenoli – wysoka tolerancja materiałowa
- Nie odbarwia powierzchni i nie pozostawia smug
- Nie wymaga spłukiwania wodą po aplikacji
- Przyjemny, świeży zapach cytrynowy
- Przebadany zgodnie z aktualnymi normami dla środków dezynfekcyjnych
- Ekonomiczny w użyciu

Jak stosować Velox Top AF

Preparat jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania – nie wymaga rozcieńczania.

- Spryskaj dezynfekowaną powierzchnię preparatem, trzymając butelkę w odległości około 30 cm.
- Pozostaw preparat na powierzchni – nie wymaga spłukiwania wodą.
- Po kilku minutach powierzchnia jest sucha i gotowa do użycia, bez smug i pozostałości.

Uwaga: Velox Top AF nie może być stosowany na powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholu.

Środki ostrożności:



- Kontakt ze skórą: umyć skórę wodą z mydłem i dokładnie spłukać.
- Kontakt z oczami: przepłukiwać oczy przez około 15 minut dużą ilością wody przy szeroko rozwartych powiekach, unikając silnego strumienia. Skonsultować się z lekarzem.

Korzyści dla użytkownika

Velox Top AF to rozwiązanie dla gabinetów medycznych, stomatologicznych i kosmetycznych, w których dezynfekcja musi być szybka, pewna i bezpieczna dla sprzętu. Preparat skutecznie dezynfekuje łóżka i fotele zabiegowe, aparaturę operacyjną, końcówki stomatologiczne przed sterylizacją, a także protezy i wyciski silikonowe. Brak aldehydów i fenoli sprawia, że jest łagodny dla tworzyw sztucznych, materiałów obiciowych i innych wrażliwych powierzchni – nie niszczy ich struktury ani koloru. Formuła bez spłukiwania i szybkie schnięcie bez smug oznaczają mniej czasu poświęconego na porządkowanie stanowiska pracy i więcej czasu dla pacjenta.

Certyfikaty i wiarygodność

- Pozytywna opinia w zakresie tolerancji materiałowej dla tworzywa ABS oraz materiałów obiciowych wydana przez firmę Famed
- Rekomendacja Centrum Zdrowia Dziecka
- Przebadany zgodnie z aktualnymi normami dla środków dezynfekcyjnych

Specyfikacja techniczna

- Nazwa produktu: Velox Top AF
- Pojemność: 1 L
- Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem
- Skład (na 100 g): propan-1-ol 40,0 g; alkohol etylowy 20,0 g
- Zapach: cytrynowy
- Zawiera aldehydy: nie
- Zawiera fenole: nie
- Wymaga spłukiwania: nie
- Czas działania: od 30 sekund

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: MEDISEPT Sp. z o.o. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zapach: Grejpfrut , Neutralny

