

Link do produktu: <https://5elementum.eu/velox-wipes-na-medisept-bezalkoholowe-chusteczki-do-dezynfekcji-powierzchni-wklad-100-szt-p-162.html>



Velox Wipes NA Medisept – bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni wkład 100 szt.

Cena	18,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5907626633986

Opis produktu

Chusteczki do dezynfekcji Velox Wipes NA – bezalkoholowe, 100 szt.

Velox Wipes NA to profesjonalne chusteczki do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Gotowe do użycia od razu po otwarciu – skutecznie eliminują bakterie, grzyby i wirusy już w ciągu pierwszej minuty, bez konieczności spłukiwania wodą. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka higiena: w placówkach medycznych, gabinetach fizjoterapeutycznych, salonach kosmetycznych i studiach tatuażu.

Co zawiera opakowanie?

- 100 chusteczek nasączonych roztworem dezynfekującym
- Łączna masa roztworu: 173 g
- Materiał chusteczki: włóknina 23 g/m²
- Wymiary chusteczki: 13 x 20 cm

Jak działają chusteczki Velox Wipes NA?

Velox Wipes NA działają na zasadzie bezpośredniego kontaktu nasączonej chusteczki z dezynfekowaną powierzchnią. Formuła bez aldehydów i fosforanów sprawia, że preparat jest bezpieczny dla wrażliwych materiałów – nie odbarwia i nie niszczy powierzchni sprzętu medycznego, w tym lamp i głowic USG, foteli oraz blatów mających kontakt z żywnością.

Sposób użycia:

- Wyjąć chusteczkę z opakowania.
- Przetrzeć dokładnie dezynfekowaną powierzchnię.
- Nie spłukiwać wodą po zastosowaniu.
- Po otwarciu opakowania użyć chusteczki w ciągu 30 dni.
- Nie stosować, gdy chusteczka jest sucha.

Korzyści dla użytkownika

- **Szybkie działanie** – bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze już od 1. minuty kontaktu.
- **Skuteczność wobec prątków gruźlicy** – eliminacja już w 5 minut.
- **Bezpieczne dla wrażliwego sprzętu** – formuła bez alkoholu, aldehydów i fosforanów nie uszkadza ani nie odbarwia powierzchni.
- **Gotowe do użycia** – bez rozcieńczania, odmierzania ani przygotowania roztworu.
- **Wszechstronne zastosowanie** – odpowiednie do sprzętu medycznego, powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz wyposażenia gabinetów kosmetycznych.



- **Ekonomiczne** – 100 chusteczek w jednym opakowaniu, przyjemny zapach podczas stosowania.

Specyfikacja techniczna

- Ilość w opakowaniu: 100 szt.
- Materiał: włóknina 23 g/m²
- Wielkość: 13x20 cm

Skład (100 g roztworu): 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian (sól).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: MEDISEPT Sp. z o.o. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

